

機械器具 48

一般医療機器 汎用注射筒 13929001

ヘンケジェクト（HENKE-JECT）カテーテルチップディスプレイシリンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

<使用方法>

- 血管系ラインとの接続はしないこと。[血管を通じて、経腸栄養ラインに投与されるべき内服液剤など注射以外の液剤が投与され、重篤な症状になる可能性がある。]


【形状・構造及び原理等】

<構造図>

本品は外筒、プランジャー（押し子）ガスケットからなる。

100mL カテーテルチップ ディスposiシリンジ

単位：mm

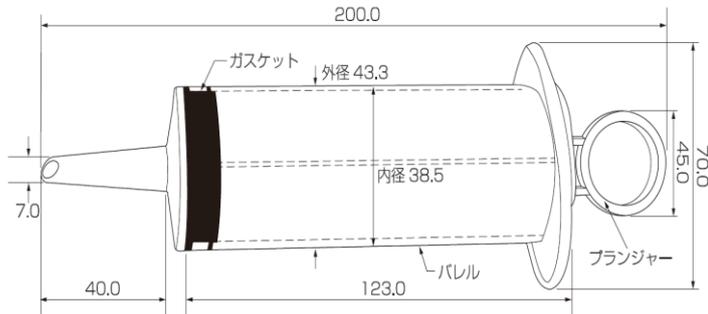

【使用目的又は効果】

本品は、経腸栄養ラインを通じた内服液剤投与など、液剤投与に使用するための器具である。

【使用方法等】

- 必要に応じて手袋を着用する。
- 本品を包装から取り出し、先端にカテーテルと確実に接続し、液剤を注入する。

<使用方法に関連する使用上の注意>

- 包装が破損・汚染している場合や、製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- 包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意して、医療廃棄物として、安全な方法で処分すること。
- カテーテル等との接続する場合は、以下の事項を順守すること。
 - 接続する場合は、過度な締め付けはしないこと。
 - 接続部分に薬液又は血液を付着させないこと。
 - 本品に衝撃を与えず、確実に接続し、漏れ等の異常の有無について、必ず確認すること。
- 押し子を引く場合は、以下の事項を順守すること。
 - 外筒に印刷されている目盛以上は引かないこと。
 - 押し子を、まっすぐそしてゆっくりと引くこと。
[強く引いたりねじったりすれば液漏れやガスケットが外れる可能性がある。]

- 他の医療機器等と接合する場合は、以下の事項を順守すること。
 - 嵌合する場合は、過度な締め付けをしないこと。
 - テーパ部分に薬液を付着させないこと。
 - メスコネクターとはめあわせて使用する時には、横方向の力を加えないこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 併用する医療機器及び医薬品の添付文書を確認後、使用すること。
- 使用中は本品の破損、接続部の緩み及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 接液部を汚染させないこと。
- 本品を再滅菌しないこと
- 外筒印刷部は、強くこすらないこと。また、印刷部に薬液がついた状態で放置しないこと。[目盛が消えるおそれがある。]
- シリンジポンプに対する適用は確認していないため、本品をシリンジポンプに使用する場合は、必ずシリンジポンプのメーカーに適用の可否を確認すること。
- 本品使用後は医療機器廃棄物として処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

<貯蔵・保管方法>

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿を避けて保管すること。

<有効期間>

外箱に記載

【主要文献及び文献請求先】

請求先：大阪ケミカル株式会社

住所：大阪府大阪市北区天神西町5番17号

電話番号：06-6311-1050

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：大阪ケミカル株式会社

住所：大阪府大阪市北区西天満5丁目2-18

お問合せ電話番号：06-6130-1717

外国製造業者：Almo Erzeugnisse Erwin Busch GmbH

国名：ドイツ

【販売業者（販売店）】

