

使用 方 法

1. 使用前の準備

- 1) 製品を開封する前に、製品のパッケージが損傷していないか、開封されていないかを確認してください。
- 2) 製品に欠陥や汚染がないか確認します。異常のある製品は使用しないでください。
- 3) 製品の有効期限を確認してください。
- 4) シリンジをパッケージから慎重に取り出します。

2. 使用方法

- 1) ニードル（針管）の透明な保護キャップを保持しながら、ニードルハブ（針もと）をシリンジのルアーロックの端に時計回りに押して、ニードル（針管）をシリンジに取り付けます。
- 2) 確立された手順に従って、溶液をシリンジに抜き取ります。プランジャー（押し子）の最も広い部分から線量を測定します。



- 3) アルコール綿で患者の注射部位を拭きます。
- 4) 針の保護キャップを外し、注射する個所に針を挿入して注射を行います。
- 5) 注射後、注射部位をアルコール綿で拭きます。

3. 使用後の注意事項

- 1) この製品は単回使用であり、再利用しないでください。
- 2) 使用済みの注射器は、適用される規制に従って廃棄してください。

4. その他

併用する機器は、当社指定品であること。