

使用方法

1. 使用前の準備

- 1) 開封する前に、パッケージが破損または開封されていないか確認してください。
- 2) 針に欠陥や汚れがないか確認してください。異常のある針は使用しないでください。
- 3) 製品の有効期限を確認してください。

2. 使用方法

- 1) 針の汚染を防ぐため、手順の直前に滅菌済みパッケージから針を取り出します。
- 2) ニードル（針管）の透明な保護キャップを保持したまま、ニードルハブ（針もと）をシリンジ（申請外）のルアーロックの端に時計回りに押して、ニードル（針管）をシリンジに取り付けます。
- 3) 安全ガードを後方に引き、針の保護キャップを外し、使用目的に応じて針を使用してください。（調整機能：安全ガードが邪魔な場合は、シリンジとの接続が緩まないよう安全ガードを時計回りに回転させて任意の場所に移動できます。）



- 4) 安全ガードを指で針の上に押しつけて、安全ガードを作動させます。または安全ガードのヒンジ部分を硬い面に押し当てます。いずれの場合も「カチッ」という音がします。



3. 使用後の説明 <使用方法等に関連する使用上の注意>

- 1) 使用済み製品は指定の使用済みと識別した鋭利物容器に入れて廃棄してください。
- 2) この製品は単回使用であり、再利用しないでください。
- 3) 併用する機器は、当社指定品であること。

[当社指定品]

一般的名称：汎用注射筒（JMDN コード 13929001）

販売名：LDV ルアーロック プラスティックシリンジ 1mL

型番：PLAS-010001

製造販売業者名：大阪ケミカル株式会社

届出番号：27B2X00350000007